



Poulpharm bvba
Prins Albertlaan 112, 8870 IZEGEM
Tel. +(32) 51 30 41 00
E-mail: labo@poulpharm.be | www.poulpharm.be

Vak voorbehouden aan het labo

FOR-065 versie 1 Geldig vanaf: 08/05/2017

Aanvraagformulier Hygiënogram

KLANTENGEGEVENS Beslagnummer:..... Naam:..... Adres:..... Postcode: Gemeente:	BEDRIJFSDIERENARTS Naam:..... Datum aanvraag:/...../..... Naam + Handtekening aanvrager:
RESULTAAT AAN: Taal: ☐ NL ☐ FR ☐ Klant ☐ Broeierij ☐ Dierenarts ☐ Andere (specifieer):.....	FACTURATIE: ☐ Klant ☐ Broeierij ☐ Dierenarts ☐ Andere (specifieer):.....
DATUM + UUR STAALNAME:/...../..... om..... STAALNEMER:	Opmerkingen:

DIERGEGEVENS

Soort pluimvee ☐ Kippen ☐ Kalkoenen ☐ Eenden ☐ Ganzen ☐ Parelhoenders
Categorie ☐ Gebruik ☐ Opfok Type ☐ Leg ☐ Vlees

HOKGEGEVENS

Hoknr: Soort stal ☐ Grondstal ☐ Verrijkte kooi ☐ Volièrestal ☐ Roosterstal
--

Visuele beoordeling

Reinheid inventaris	☐ Goed	☐ Voldoende	☐ Matig	☐ Slecht
Reinheid vloer	☐ Goed	☐ Voldoende	☐ Matig	☐ Slecht
Reinheid muren & plafonds	☐ Goed	☐ Voldoende	☐ Matig	☐ Slecht
Ongediertewering	☐ Goed	☐ Voldoende	☐ Matig	☐ Slecht
Ongediertesporen	☐ Afwezig	☐ Schade	☐ Uitwerpselen	☐ Kevers ☐ Vliegen ☐ Larven

Reiniging en ontsmetting

Reiniging: ☐ ja ☐ nee	Ontsmetting: ☐ ja ☐ nee
Uitvoerder ontsmetting ☐ firma:.....	☐ zelf
Ontsmettingsmiddel:	Duur:h Temperatuur:°C
Tijd tussen staalname en ventilatie:	Probioticum:

Aanvullende informatie

- Rodacplaatjes worden voor gebruik bewaard bij een temperatuur tussen 12°C – 25°C.
- Open na aankomst op het bedrijf maar voor betreden van de stal het pakje rodacplaatjes.
- Nummer de plaatjes overeenkomstig de bemonsteringsplaats (zie onder).
- Bemonster geen natte plekken in de stal.
- Controleer de rodacplaatjes vòòr gebruik op afwezigheid van condens, groei, houdbaarheidsdatum en intactheid.
- Neem het deksel van het plaatje af en druk zonder draaiende beweging éénmalig met gelijke druk gedurende 15 seconden op het oppervlak. Raak hierbij de agar niet aan.
- Plaats het deksel terug en breng het plaatje met de agar bovenaan in een houder.
- **Neem steeds twee controlestalen:**
 - Positieve controle = bemonstering buiten de stal maar binnen de grenzen van het bedrijf
 - Negatieve controle = niet bemonsterd plaatje
- **Breng de plaatjes binnen de 12 uur na staalname naar het laboratorium voor incubatie.**
- Vul het aanvraagformulier volledig in.
- Voor vervoer wordt een temperatuur tussen 0°C – 20°C gehanteerd.
- Methode: PCCB/S2/769127, laatst geldige versie (Vademecum voor het houden van pluimvee en de bestrijding van *Salmonella* bij pluimvee, FAVV), opgenomen in WI-007.

Bemonsteringsplaatsen per type stal

Grondstal							
1	Vloer	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
2	Vloersysteem	2.1	2.2	2.3	2.4		
3	Drinksysteem	3.1	3.2	3.3	3.4		
4	Wand	4.1	4.2	4.3			
5	Plafond	5.1	5.2				
6	Inlaat binnen	6.1	6.2				
7	Hopper	7					
8	Voorruimte	8					

Roosterstal / Voliërestal					
1	Vloer	1.1	1.2	1.3	1.4
2	Rooster	2.1	2.2		
3	Voersysteem	3.1	3.2	3.3	
4	Drinksysteem	4.1	4.2	4.3	
5	Wand	5.1	5.2		
6	Plafond	6.1	6.2		
7	Inlaat binnen	7			
8	Hopper	8			
9	Voorruimte	9			
10	Legnet	10.1	10.2		
11	Eierbewaarlokaal	11			

Roosterstal / Volië opfok					
1	Vloer	1.1	1.2	1.3	1.4
2	Rooster	2.1	2.2		
3	Voersysteem	3.1	3.2	3.3	
4	Drinksysteem	4.1	4.2	4.3	
5	Wand	5.1	5.2		
6	Plafond	6.1	6.2		
7	Inlaat binnen	7			
8	Hopper	8			
9	Voorruimte	9			

Kooistal leg					
1	Voersysteem	1.1	1.2	1.3	1.4
2	Kooibodem	2.1	2.2	2.3	
3	Kooiwand	3.1	3.2	3.3	
4	Drinksysteem	4.1	4.2	4.3	
5	Plafond	5.1	5.2		
6	Tussenpad	6.1	6.2		
7	Inlaat binnen	7			
8	Voerhopper	8			
9	Voorruimte	9			
10	Eierband	10.1	10.2		
11	Eierbewaarlokaal	11			

Kooistal / Batterij Opfok					
1	Voersysteem	1.1	1.2	1.3	1.4
2	Kooibodem	2.1	2.2	2.3	
3	Kooiwand	3.1	3.2	3.3	
4	Drinksysteem	4.1	4.2	4.3	
5	Plafond	5.1	5.2		
6	Tussenpad	6.1	6.2		
7	Inlaat binnen	7			
8	Voerhopper	8			
9	Voorruimte	9			

Afraap							
5	Leveringsbakken	5.1	5.2	5.3			
6	Separator	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6
7	Handen sorteerder	7					